


АППЛИКАТОРЫ БОЛЮСОВ DATAMARS SMALL И MEDIUM

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

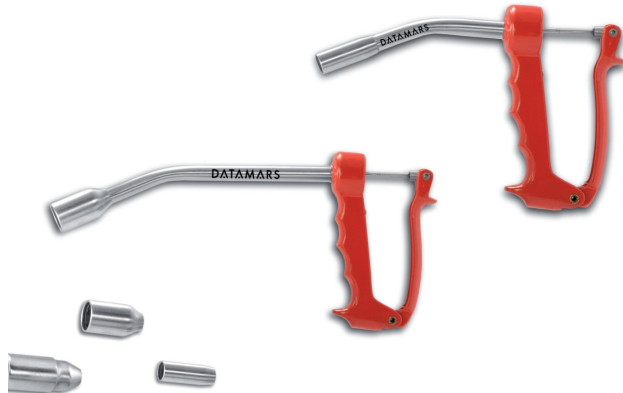

Аппликатор из нержавеющей стали используется для перорального введения болюсов Z20, Z52 и Z72 (в зависимости от болюса выбирается головка аппликатора). Имеет специальный изгиб, чтобы избежать травм во время имплантации.

Дизайн изгиба и механизм удерживания/освобождения болюса (пружина) запатентованы.

Обе модели аппликатора поставляются со сменными головками в соответствии типом используемых болюсов.

Преимущества:

- Простой в использовании ручной аппликатор
- Эргономичная форма
- Быстрое введение болюса
- Сменные головки
- Долгий срок службы

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВВЕДЕНИЮ БОЛЮСОВ:


1. Извлеките болюс из пакета и проверьте, что болюс может быть считан ридером.
2. Установите болюс в аппликатор.
3. Стоя со стороны головы животного, откройте ему рот и прижмите язык к нижнему небу.
4. Вставьте головку аппликатора в ротовую полость животного. **Не тяните голову животного на себя.**
5. Мягко нажмите на спусковой крючок аппликатора для освобождения болюса и медленно извлеките аппликатор.
6. После извлечения аппликатора из ротовой полости животного, освободите челюсти животного и его голову. Освобождение головы позволяет животному легко и без лишнего напряжения проглотить болюс.
7. Проверьте, проглотило ли животное болюс. Если болюс остался во рту, животное прожует и выплюнет его. Поднимите болюс и повторите процедуру.
8. Если животное не выплюнуло болюс, убедитесь, что он проглочен и спускается по пищеводу в рубец.

9. После окончания фазы проглатывания (непроизвольная фаза), местоположение болюса можно определить с помощью ручного ридера (so stick-антенной). Если болюс не был полностью проглочен, он будет определяться во рту или в начале пищевода. В этих случаях проглотить болюс поможет массаж горла животного.


10. Процесс аппликации считается завершенным, когда болюс определяется в области ретикулума, который находится у животного с левой стороны рядом с сердцем.

Технические характеристики

Аппликатор SMALL

Высота	13,5 см	
Общая длина трубки	22,5 см	
Длина трубки до изгиба	13,0 см	
Сменные головки для болюсов	Z20 и Z52	

Аппликатор MEDIUM

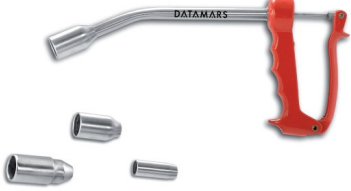Высота	13,5 см	
Общая длина трубки	31,0 см	
Длина трубки до изгиба	21,0 см	
Сменные головки для болюсов	Z20, Z52 и Z72	

В технических характеристиках возможны изменения без предварительного уведомления